



Hillrom™



# Hillrom™ Matratzen- system P290

## SAFE SKIN-UMGEBUNG FÜR IHRE PATIENTEN


Druckulzera sind kostenintensiv und weisen eine hohe Prävalenz auf. Aus diesem Grund wurde das Matratzenauflagesystem bzw. das Matratzenersatzsystem P290 von Hillrom entwickelt. Es trägt dazu bei, Druckulzera bei erwachsenen Patienten mit geringem bis hohem Risiko zu verhindern und zu behandeln. Sowohl im Wecheldruck- als auch im kontinuierlichen Niederdrucktherapiemodus, lässt sich die Einsinktiefe des Patienten in das Matratzenersatzsystem, anpassen.

Dieser therapeutische Ansatz zielt darauf ab die Druckbelastung empfindlicher Gewebe zu reduzieren. Er hilft damit die Empfehlungen der Internationalen NPUAP/EPUAP/PPPIA umzusetzen. Diese empfiehlt Klinikmitarbeitern, „eine aktive druckverteilende Unterlage für Patienten mit einem erhöhten Dekubitusrisiko zu verwenden, wenn eine häufige manuelle Umlagerung nicht möglich ist.“<sup>1</sup>


# Hillrom™ Matratzensystem P290

## MATRATZENAUF- UND MATRATZENERSATZSYSTEM

Schaumstoff

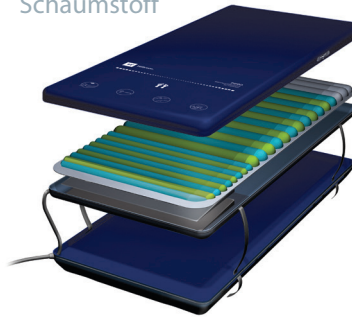

Luftkammer

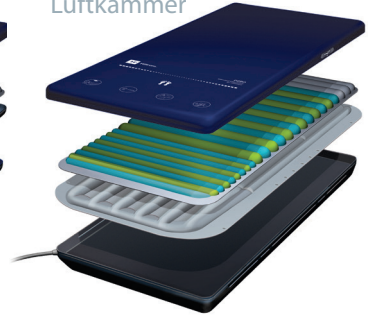

### FUNKTIONEN UND VORTEILE

Speziell entwickelt zur verbesserten Prophylaxe und Behandlung bei Patienten mit Dekubitusrisiko oder bestehendem Druckulkus.

Eine Reihe an Wechsellast- oder kontinuierlichen Niederdrucktherapieoptionen, die den Bedürfnissen des Patienten und klinischen Präferenzen entsprechen.

Einstellbare Zykluszeiten und Härtegradeinstellung zur besseren Steuerung von Therapie und Komfort des Patienten.

Sicherheitsfunktionen für Patienten und Pflegepersonal einschließlich automatischer Sperre des Bedienpanels, Fehleranzeigen und 10-Stunden-Transportmodus

Drei Druckumverteilungszonen bieten zusätzlichen Schutz für empfindliche Körperbereiche, einschließlich einer alternierenden Fersenzone mit 5°-Neigung

Die Befüllungsoptionen P-MAX und PLUS sorgen für zusätzliche Unterstützung und Sicherheit bei der Positionierung und dem Transfer von Patienten

Das Matratzensystem ist mit einer Luft- oder Schaumstoffauflage erhältlich.

Röntgenhülle zur Erleichterung von Röntgenaufnahmen im Bett für mehr Patientenkomfort

Transportgriffe für eine mögliche Evakuierung des Patienten im Notfall

### TECHNISCHE DATEN

#### MATRATZENAUF- UND MATRATZENERSATZSYSTEM

<b>Länge</b>	200 cm
<b>Breite</b>	90 cm
<b>Höhe</b>	10 cm
<b>Gewicht</b>	6,1 kg

#### MATRATZENERSATZSYSTEM – SCHAUMSTOFF

<b>Länge</b>	200 cm
<b>Breite</b>	90 cm
<b>Höhe</b>	17 cm
<b>Gewicht</b>	12 kg

#### MATRATZENERSATZSYSTEM – AIR (LUFTKAMMER)

<b>Länge</b>	200 cm
<b>Breite</b>	90 cm
<b>Höhe</b>	17 cm
<b>Gewicht</b>	7,5 kg

#### STEUEREINHEIT

<b>Länge</b>	90 cm
<b>Breite</b>	20 cm
<b>Höhe</b>	12 cm
<b>Gewicht</b>	2,2 kg

<b>Sichere Arbeitslast</b>	250 kg
----------------------------	--------

<b>Empfohlenes therapeutisches Gewicht</b>	30 bis 140 kg
--	---------------

#### Bezugsmaterial

Polyesterbeschichtung auf Polyestermaterial, 360°-Reißverschluss, Schweißnähte, geringe Reibung, bi-elastisch, wasserdampfdurchlässig, bakterio- und fungistatisch, antimikrobiell. Abwischbar und waschbar. Es können Reinigungslösungen auf Chlorbasis verwendet werden (≤ 1.000 ppm).

**hillrom.de**

<sup>1</sup> EPUAP/NPIAP/PPPIA International Guidelines for the Prevention & Treatment of Pressure Ulcers, 2014.

Das Matratzensystem P290 ist zur Prophylaxe und Behandlung von Druckulzera der Stadien I, II und III bei Patienten mit geringem bis hohem Risiko und einem Gewicht von mindestens 30 kg und einer Größe von mindestens 1,46 m in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen vorgesehen.

Klasse IIa

Benannte Stelle: LNE/G-Med CE0459

Hersteller: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët, 56330 Pluvigner, Frankreich

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassende Begleitdokumentation der Medizinprodukte zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich. Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.